

RECOVERY SHOE

QUICK STEP - installation




-  1. Open the Shoe wide.
-  1. Öffnen Sie den Schuh.
-  1. Ouvrez grand l'hipposandale.
-  1. Abra bien la bota.



-  2. Place the shoe on the hoof. Make sure that the toe is all the way in front of the shoe, and that the shoe is centered in the back.
-  2. Den Schuh auf den Huf ziehen. Achte darauf, dass die Zehe ganz vorne und der Schuh hinten zentriert ist.
-  2. Placez l'hipposandale sur le pied. Veillez Step là ce que la pince soit complètement l'avant du chausson et que celui-ci soit centré l'arrière.
-  2. Coloque la bota en el casco. Asegurese de que la punta del casco esta encajada en la punta de la bota y de que la bota está también centrada en la parte posterior.



-  3. Pull the neoprene material up and together in the front, and then close the zipper.
-  3. Ziehen Sie das Neoprenmaterial vorne nach oben und zusammen und schließen Sie dann den Reißverschluss
-  3. Tirez le matériau néoprène vers le haut et ensemble à l'avant, puis fermez la fermeture éclair.
-  3. Tire del material de neopreno hacia arriba y júntelo en la parte delantera, luego cierre la cremallera.

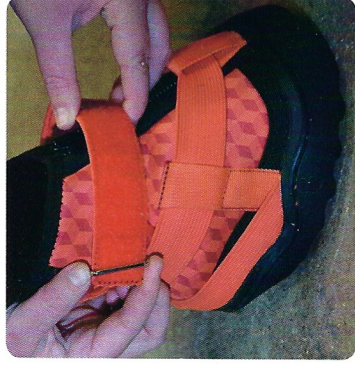

-  4. Thread the elastic band through the buckle and tighten.
-  4. Führen Sie das Gummiband durch die Schnalle und ziehen Sie es fest.
-  4. Enfilez l'élastique dans la boucle et serrez.
-  4. Pase la banda elástica a través de la hebilla y apriete.



-  5. Attach elastic band to the Velcro.
-  5. Befestigen Sie das Gummiband am Klettverschluss.
-  5. Fixez un élastique au Velcro.
-  5. Coloque una banda elástica en el velcro.



-  6. Ready to use!
-  6. Gebrauchsfertig!
-  6. Prêt à l'emploi !
-  6. ¡Preparado para usar!